




**COVIDIEN**

*positive results for life™*

# ЭВОЛЮЦИЯ УШИВАНИЯ РАНЫ

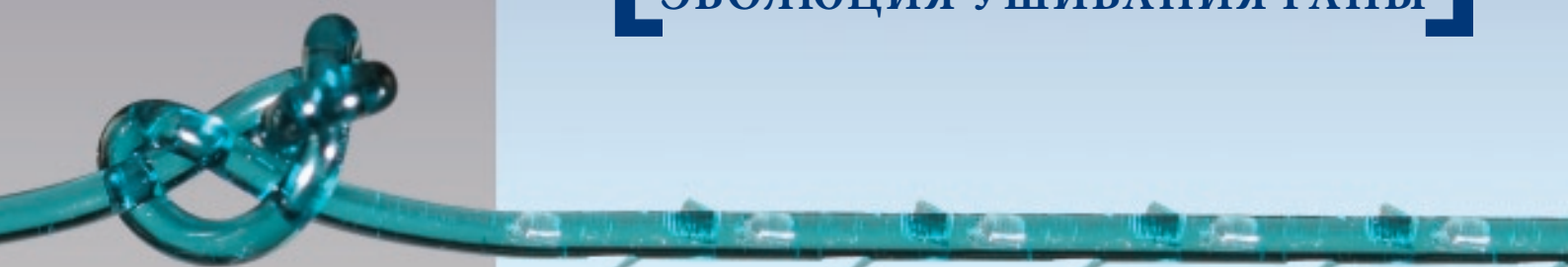


**V-Loc™ 180 – рассасывающийся  
инструмент ушивания раны**  
Пошаговое руководство

**Надежно. Быстро. Эффективно.**


## Использование V-Loc™ 180

Данное руководство демонстрирует принципы использования V-Loc™ 180 для ушивания раны без изменения либо с минимальными изменениями привычной техники.

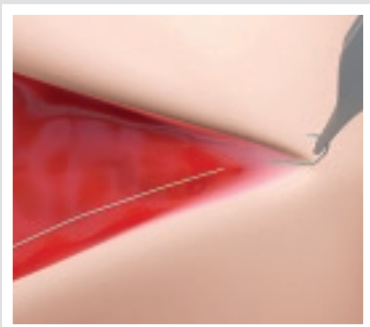


### Шаг 1.

Начните закрытие раны внутрикожно в обратном направлении, с выходом иглы в начале разреза.

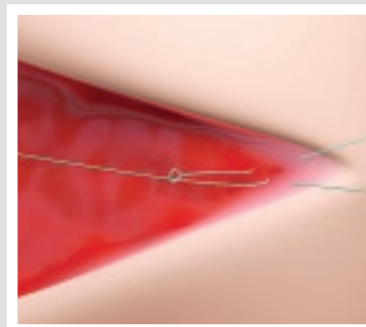


### Шаг 2.

Конец с петлей должен смотреть в направлении продолжения шва. Протяните нить, чтобы остался небольшой хвост.

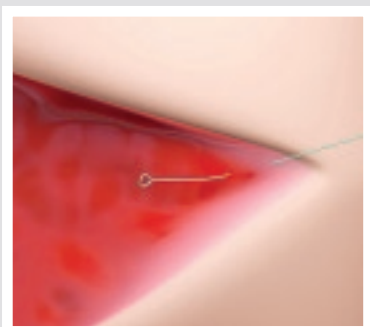


### Шаг 3.

Сделайте аналогичный прокол от конца разреза в продольном шву в направлении с другой стороны. Выход иглы должен располагаться прямо напротив места входа конца с петлей.

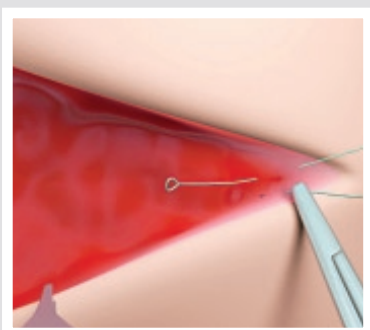


### Шаг 4.

Проденьте иглу с нитью через петлю и легкой тракцией аккуратно сопоставьте края разреза.

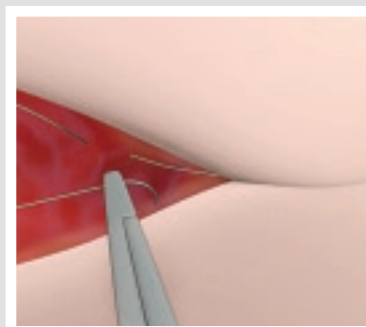


### Шаг 5.

Продолжите шов, начав с края разреза, с которого производился первый прокол иглой, стандартным внутрикожным швом. Старайтесь избегать излишнего натяжения нити, т.к. это может привести к сбавиванию шва.

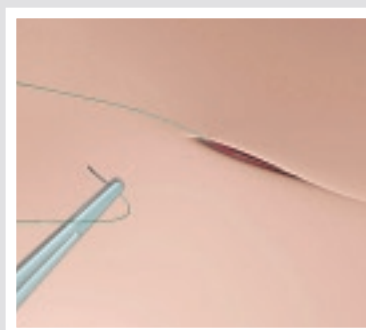

### Шаг 6.

Завершите шов так, чтобы место последнего выхода иглы находилось в самом углу конца разреза.

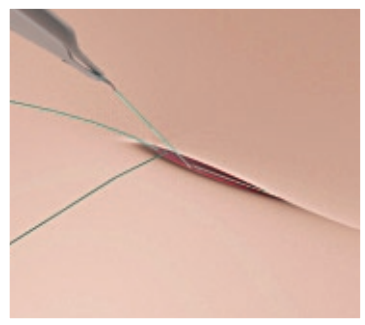

#### Шаг 7.

Далее сделайте прокол иглой в обратном направлении.



#### Шаг 8.

Последний прокол иглой производится непосредственно в разрез, перпендикулярно ему, с выходом наружу через кожу.



#### Шаг 9.

Слегка потяните и срежьте V-Loc™ 180 по уровню кожи, чтобы нить скрылась.



# Упаковка V-Loc™ 180

The V-Loc™ имеет уникальную круглую упаковку, минимизирующую память формы, и обеспечивает удобный захват иглодержателем.



### Шаг 1.

Переместите основную стерильную упаковку из прозрачного пакета в стерильную зону.



### Шаг 4.

Захватите иглу иглодержателем, потяните и извлеките нить (Дизайн упаковки минимизирует память формы).



### Шаг 2.

Разорвите основную упаковку по стрелке.



Наклейка на дне пластиковой упаковки содержит информацию о продукте.



### Шаг 3.

Удалите бумажный ярлык за выступающий язычок.



COVIDIEN

COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом "positive results for life" и бренды с маркировкой ™ являются зарегистрированными торговыми марками Covidien AG или аффилированных компаний. © 2009 Covidien. Все права защищены.

WWW.COVIDIEN.COM

Представительство  
Корпорации  
COVIDIEN AG  
(Швейцария)

(S" #&%,  
ул.  
д. 5(Ž, S ž

I +7 (%&& %& % %  
+7 (%&& % % S%#+(

i i i ЖИЗНЬ ВЗГ